



自然吸吮

# 吸乳器

支援母乳哺育

手動

## 使用說明書

誠摯感謝您購買貝親的吸乳器，  
使用前，請務必詳細閱讀使用說明書，以利正確操作。

全家一起享受  
母乳育兒的  
樂趣吧。



# 使用注意事項

①

## 使用前須知


依據錯誤操作的結果，以及可能產生的危險和傷害，用以下的表示進行說明。

**⚠ 警告** 表示“如果發生錯誤操作，有可能造成死亡或重傷”。

**⚠ 注意** 表示“如果發生錯誤操作，有可能會給人造成傷害或者物品損壞”。

### ⚠ 警告

- 請放置於嬰幼兒無法觸及的地方，以免造成誤吞食小零件、受傷等意外發生。

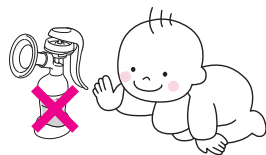

### ⚠ 注意


- 請勿過度使用或連續吸引，有可能會造成乳房疼痛。
- 乳房疼痛時，請中止吸乳，以防情況惡化。
- 因操作握把而導致手指和手疼痛時，請停止使用。否則有可能會引發腱鞘炎等。
- 請勿用於吸乳以外的用途。
- 產品應放置在清潔，衛生，乾燥通風處。
- 請勿放在火源旁，以免造成產品變形或破損。


# 使用注意事項

②

## ⚠ 注意

- 請避免發生摔落，碰撞等強力衝擊，這會導致產品破損或故障。
- 請勿用稀釋劑、汽油和酒精等溶劑擦拭本產品，這會導致產品變形或破損。
- 吸乳時請勿超過奶瓶瓶身上的最高刻度線（最大刻度160ml），以免造成吸出的母乳溢出。
- 請勿使用含研磨劑的清洗劑，這會導致劃損吸乳器。
- 每次使用前，請事先確認產品是否存在損傷、破損、缺口、變形等異常事項，確認無誤後再使用。
- 吸奶前請務必先將雙手洗淨。

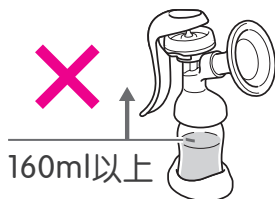

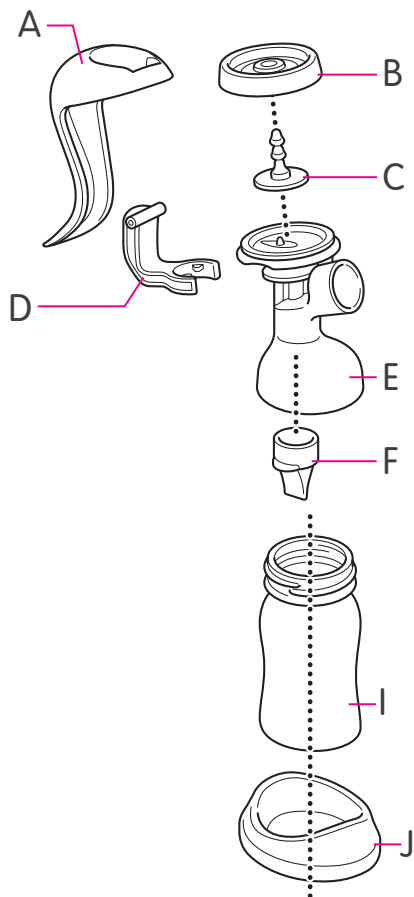


\*: 唧筒的邊緣有部分為凹陷設計，屬於正常情況。

	零件/數量
A	握把X1
B	隔板X1
C	突出柄X1
D	握把扣板X1
E	吸乳器主體X1
F	奶閥X3
G	唧筒(聚丙烯)X1
H	舒適密封氣墊(矽膠)X1
I	奶瓶X1
J	奶瓶底座X1

# 各零件名稱

P1023866 手動吸乳器

4

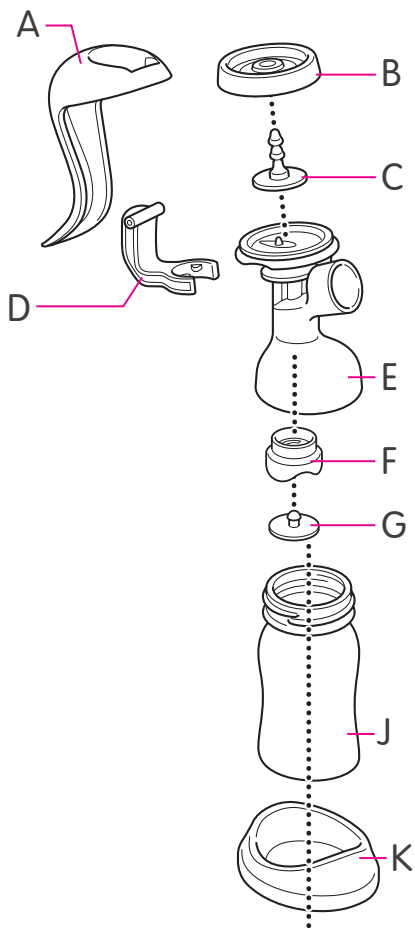


\*: 唧筒的邊緣有部分為凹陷設計，屬於正常情況。

	零件/數量
A	握把X1
B	隔板X1
C	突出柄X1
D	握把扣板X1
E	吸乳器主體X1
F	矽膠蓋X1
G	矽膠閥X2
H	唧筒(聚丙烯)X1
I	舒適密封氣墊(矽膠)X1
J	奶瓶X1
K	奶瓶底座X1

## ■ 配件

將配件裝在奶瓶瓶身上，可作為奶瓶使用。  
(參照第18頁)

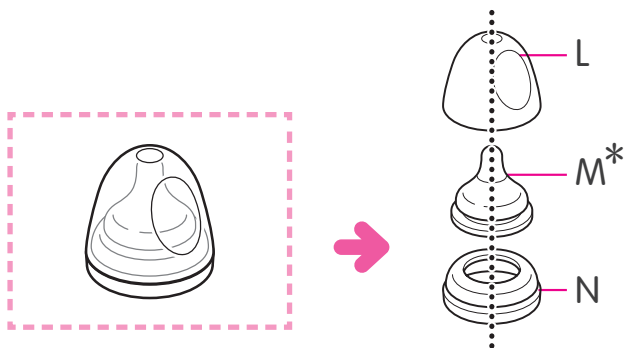

\*: 配件的奶嘴為母乳實感  
寬口徑奶嘴。  
(SS號/0個月以上。)

零件/數量	
L	奶瓶蓋X1
M	奶嘴X1
N	奶瓶栓X1

請拆卸下購買時已安裝好的零件。


## 吸乳器主體 (握把部分)

購買時已  
安裝完畢




1. 取下握把。

② 取下握把

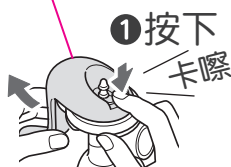

2. 取下握把扣板。

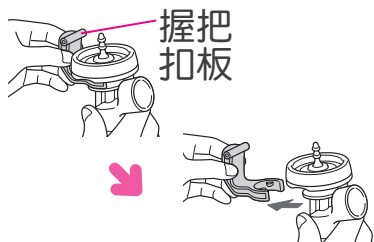

3. 取下隔板。


① 掀起




② 取下



4. 從隔板上取下突出柄。

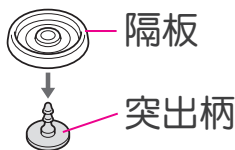

5. 從吸乳器主體上取下奶閥。

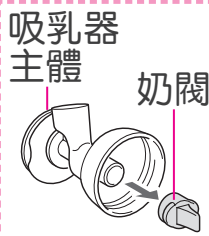


## 唧筒和舒適密封氣墊

購買時已  
安裝完畢



將唧筒和舒適密封氣墊取下

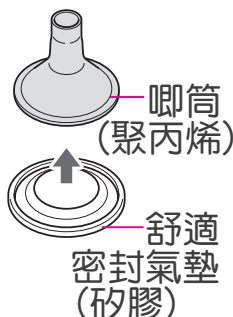


請拆卸下購買時已安裝好的零件。

## 吸乳器主體 (握把部分)


購買時已  
安裝完畢




1. 取下握把。

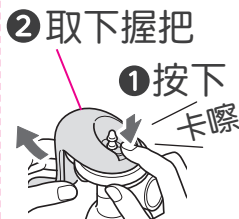



2. 取下握把扣板。

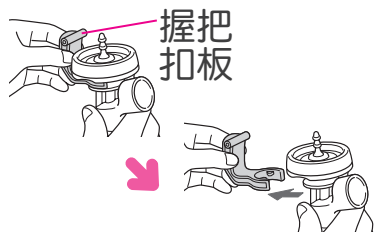

3. 取下隔板。

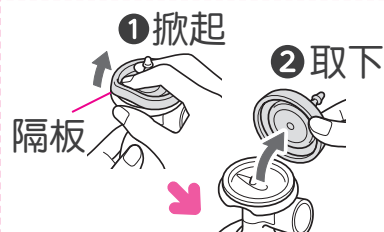


4. 從隔板上取下突出柄。

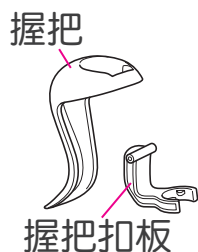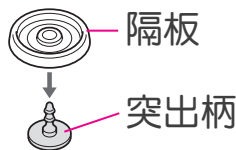


## 唧筒和舒適密封氣墊

購買時已  
安裝完畢

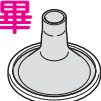

將唧筒和舒適密封氣墊取下

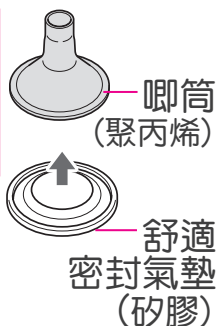

## 矽膠蓋

將矽膠閥從矽膠蓋上拆下





## 清 洗

### 注意事項

※請拆開所有零配件後，再進行洗淨、消毒。

- 在初次使用前，請務必進行洗淨、消毒。
- 使用後，請及時清洗，建議配合使用“貝親奶瓶清洗劑”進行。
- 洗淨後請務必對各零配件進行消毒。
- 吸乳器內含有很多小零件，清洗時請注意不要遺失零配件。
- 清洗時請使用柔軟的刷子。
- 矽膠材質的零配件，如果用力清洗不當有可能會造成破損或劃傷，請小心。

## 消毒

剛消毒完的產品溫度較高，請注意避免燙傷



【**煮沸消毒**】將清洗乾淨的零配件放入沸水中煮5分鐘。

※請將可消毒的零配件浸沒水中，不要接觸到鍋邊，以免變形或損壞。

※過度煮沸會影響零配件壽命。



【**蒸氣消毒**】建議使用貝親蒸氣消毒鍋消毒。

※使用電子蒸氣消毒器時，請遵照其說明書要求進行。



【**微波爐消毒**】請使用專用的微波爐消毒容器。

※請勿將產品零配件直接放入微波爐中消毒。

※消毒方法請遵照微波爐消毒容器的使用方法。

※請遵照所使用的微波爐使用說明書進行操作。

※加熱時請確認容器裡有水。



【**其他方法**】※請不要採用乾式加熱、紫外線(UV)或洗碗機/烘乾機進行消毒。避免零配件變形或損壞。


使用前，請進行拆卸、清洗、消毒。(參照P6-P9)

請在清洗、消毒且水分完全晾乾後再進行組裝。


### 1. 將奶閥組裝到吸乳器主體的底部。




### 2. 將突出柄插入隔板。

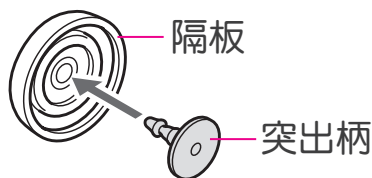


### 3. 將隔板組裝到吸乳器主體上。

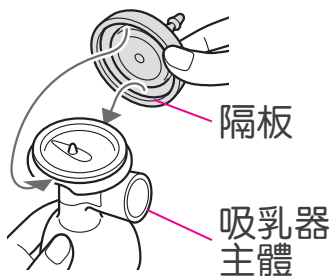

請確保隔板已充分  
嵌合在吸奶器主體上

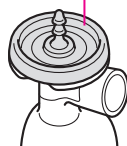

### 4. 將握把扣板組裝到吸乳器主體上。

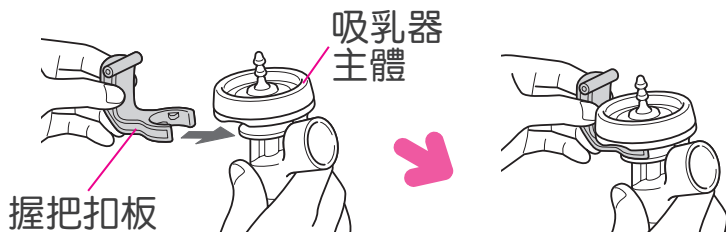

# 組裝方法

P1023866 手動吸乳器


11

使用前，請進行拆卸、清洗、消毒。(參照P6-P9)


請在清洗、消毒且水分完全晾乾後再進行組裝。

## 1. 將矽膠閥插入矽膠蓋。


\*請注意插入方向要如圖示

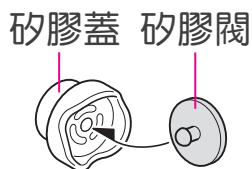

插入中心  
洞孔直到  
底部

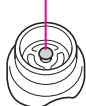


## 2. 將矽膠蓋安裝至主體內側的底部。

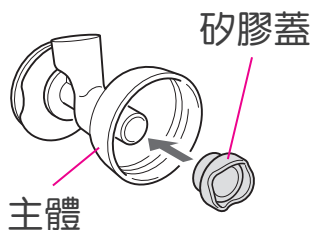


## 3. 將突出柄插入隔板。



## 4. 將隔板組裝到吸乳器主體上。

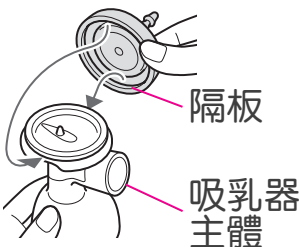

請確保隔板已  
充分嵌合在吸  
奶器主體上

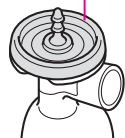


## 5. 將握把扣板組裝到吸乳器主體上。




# 組裝方法

## 6. 將握把組裝到握把扣板上。

- ① 將握把上的凹槽部分與握把扣板上的坐軸部分相嵌合

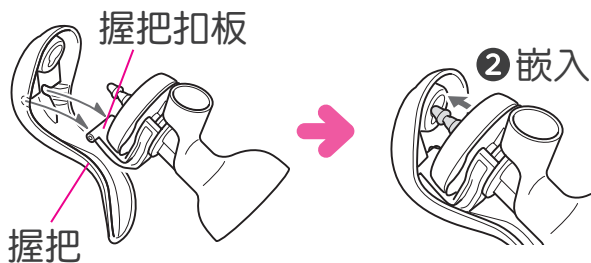


## 7. 將吸乳器主體組裝在奶瓶上。

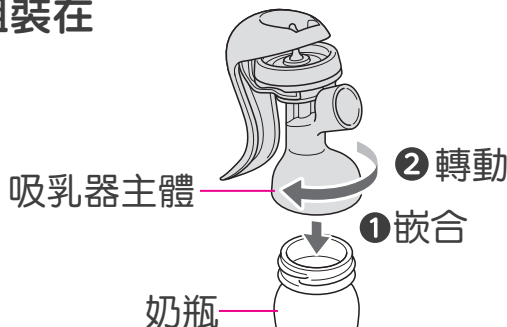

## 8. 將唧筒(聚丙烯)嵌入舒適密封氣墊(矽膠)中。

- ◆提示 根據您的使用習慣，使用時可以選擇不安裝舒適密封氣墊(矽膠)。


※唧筒(聚丙烯)的邊緣有部分為凹陷設計，屬於正常情況。

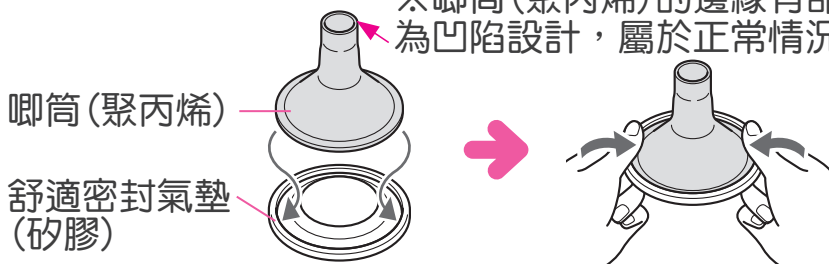


# 組裝方法

## 確認事項 安裝時請確認以下事項


**①** 唧筒(聚丙稀)充分嵌合在舒適密封氣墊(矽膠)上了嗎？

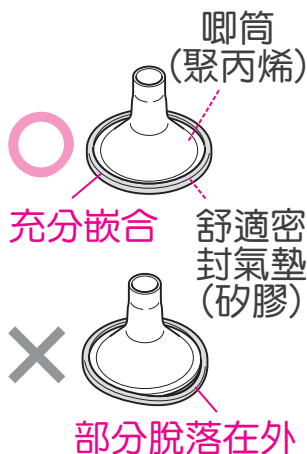


**②** 請從正面檢查唧筒(聚丙稀)，看看舒適密封氣墊(矽膠)的內側是不是標準的圓形？

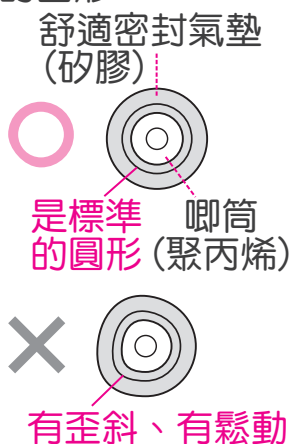

**③** 舒適密封氣墊(矽膠)的內側，是否與唧筒(聚丙稀)緊密貼合在一起？

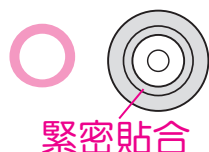


**8.** 將組裝好的唧筒和舒適密封氣墊安裝到吸乳器主體上。

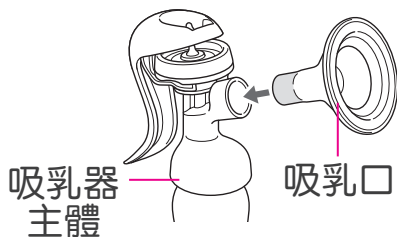

**9.** 將奶瓶裝入底座中。

**◆提示**  
配合奶瓶底座使用，不易翻倒。

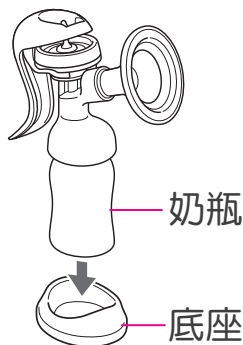

## 吸乳順序

★吸奶前，請務必將雙手洗淨。

### 吸乳準備階段

母乳開始分泌後

### 吸乳階段


以輕柔的吸引韻律來刺激乳房。



可根據您喜歡的強度和速度來進行吸奶。

### ◆提示



透過改變握把嵌入的凹槽位置，在“吸乳準備階段”和“吸乳階段”之間進行切換。

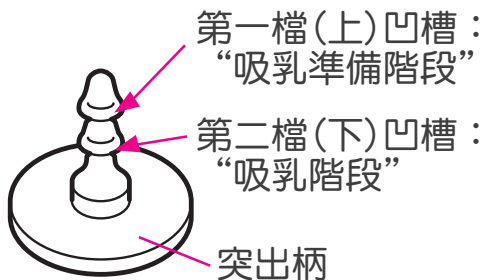


## 切換至“吸乳準備階段”

## 吸乳準備階段狀態

- ① 將突出柄的頂端朝前傾斜
- ② 輕輕握住握把，移動到突出柄第一檔(上)凹槽內

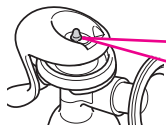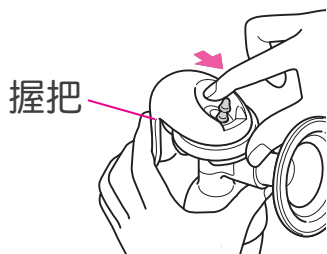


握把位於突出柄第一檔(上)凹槽內

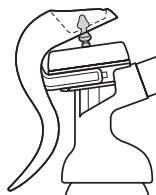

# 使用方法


## 切換至“吸乳階段”

按壓握把，移動到**突出柄第二檔(下)**的凹槽內

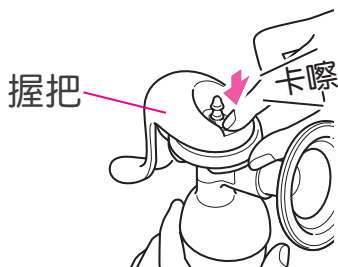



## 吸乳階段狀態

握把位於突出柄**第二檔(下)**凹槽內

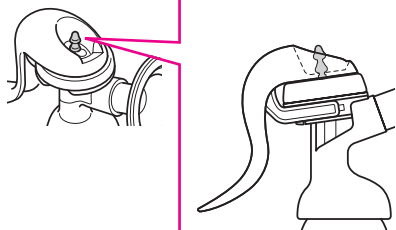

## 吸乳口的貼合方法

- 將乳頭聚攏向吸乳口的中心位置。
- 將吸乳口緊密貼合在乳房上，避免空氣從側邊漏出。
- 另一隻手托在乳房下面支撐住，使得緊密貼合效果更好。

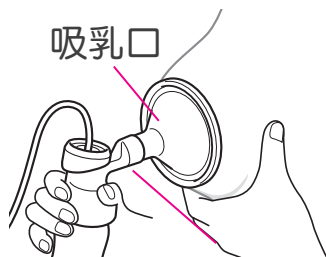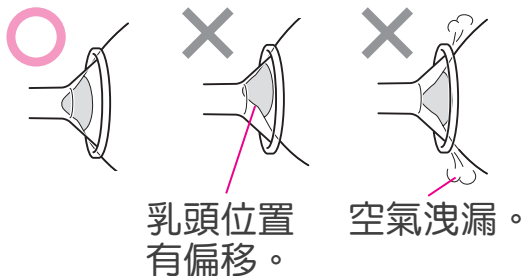





# 吸乳方法

## 握把位置的調節方法

握住吸乳器主體後轉動握把，並調節至容易握持的位置。

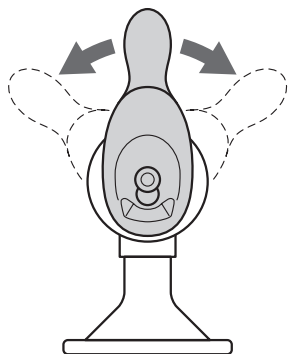


### 錯誤示範

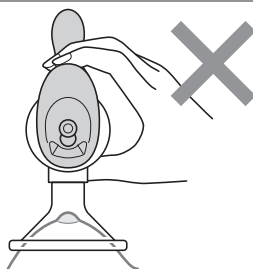


用指尖握持時，會容易感到疲勞。

### 左手握持時

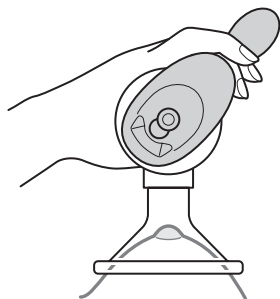

### 右手握持時

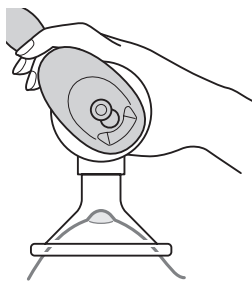


## 吸乳方法

- 一邊按壓握把並確認乳頭是否在伸縮，
- 一邊根據自己的需要調整按壓握把的速度和力道

參考時間為  
10分鐘

### ◆提示

單側乳房以10分鐘為參考時間進行吸奶。吸奶量根據乳房狀態存在個體差異，請一邊進行觀察一邊吸乳。

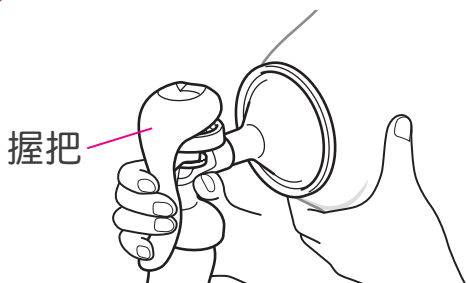

### ⚠注意

- 請一邊進行觀察，一邊調節適合自己的吸力進行吸奶。突然加大吸力的話，可能造成乳房疼痛。
- 請不要過度、長時間進行吸奶，可能造成乳房疼痛。
- 使用過程中若發出“卡嚓卡嚓”的聲音是吸奶閥在排除吸引壓力，屬於正常情況。

使用後請進行清洗。  
(參照P.8-P.9)

# 奶瓶、奶嘴的介紹

## 配件名稱及其作用

### 奶嘴

**SS號奶嘴適用於  
0個月以上新生兒**

研究寶寶的吮吸運動而製成的貝親母乳實感寬口徑奶嘴，共有5款型號的奶嘴以供選擇。

### 透氣閥

倒三角形構造，一般情況下是閉合狀態，瓶內壓力升高時，會打開以緩解瓶內壓力。

### 奶瓶

寬口徑瓶身便於清洗、泡奶，瓶身抓握舒適。

### 奶瓶蓋

密封奶嘴使其在儲藏、移動的過程中保持乾淨，有防溢保護，防止乳汁在搖動時漏出。奶瓶蓋上增加了斜面設計，放置在桌面上不會滾動。

### 奶瓶栓

將裝配好奶嘴的奶瓶栓安裝到奶瓶瓶身上旋緊，可防止瓶內的乳汁洩漏。

※本吸乳器內配置的奶瓶不能使用一般口徑奶嘴

本產品中的奶嘴僅能用於  
貝親母乳實感寬口徑奶瓶

# 奶瓶、奶嘴的介紹

## 關於母乳實感寬口徑奶嘴 SS

適用於0個月以上新生兒

SS孔徑奶嘴專為新生兒所設計。奶嘴頂端的大小完美符合哺乳窩，超柔軟的矽膠材質有助於新生兒的自然吸吮。



※哺乳窩是嬰兒口腔上顎中心的凹槽，只有哺乳期寶寶才有。

## 奶嘴和奶瓶栓的組裝方法

※本產品內配置的奶嘴需從奶瓶栓上方進行組裝

### ① 透氣閥



**[奶嘴底部]**  
組裝前請先確認透氣閥是否能正常運作。

### ②



底座


請牢牢捏住奶嘴的底座

### ③




將奶嘴從奶瓶栓上方斜插入。

### ④

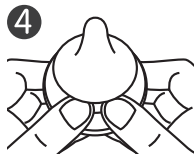

用雙手大拇指將奶嘴完全插入奶瓶栓。

### ⑤

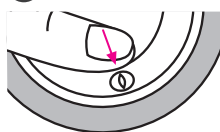

組裝完成後，請務必確認奶嘴底座是否有鬆動，組裝完成後請確認透氣閥是否能夠打開。

# 奶瓶、奶嘴的介紹

## 奶瓶使用的注意事項

注意  
燙傷

**注意！** 為了避免燙傷，請注意以下幾點：

- 泡奶時，奶瓶瓶身也會變熱，請注意避免燙傷。
  - 請不要在嬰兒旁邊泡奶，以免燙傷。
  - 務必確認飲品溫度後，再進行餵哺，以免燙傷。
  - 消毒後，奶瓶的溫度很高，請注意避免燙傷。
  - 泡奶及用熱水清洗或消毒時，請勿蓋上瓶蓋，否則會造成瓶內壓力增高，造成漏出、噴出，以及其他影響您正常使用的情況。另外，請勿上下搖動奶瓶，否則會導致瓶內液體噴出。
- 奶瓶僅限於餵乳或餵飲料時使用，請勿作其他用途。
  - 奶瓶上有刻度，為泡奶時的標準，若需要更精確的計量時，請使用計量杯或計量匙。

**泡奶方式** 詳細方法請參照奶粉的說明書。

## 餵奶方式

- 冷卻到體溫溫度後進行餵乳。
- 奶瓶栓旋得過緊，容易使奶嘴癟掉。
- 泡奶後，盡量及時哺餵，2個小時內沒有喝完的奶，請丟棄。
- 必須在成人監護下使用。

## 奶嘴的清洗方法

- 為保證衛生，在首次使用前，請務必進行清洗，並在沸水中煮沸消毒5分鐘。
- 每次使用前，請進行清洗和消毒。
- 每次使用後，請馬上用溫水浸泡，建議使用貝親奶瓶清洗劑洗滌。
- 奶嘴的前端處較為脆弱，請勿在清洗過程中用力拉扯，由此所造成的裂痕可能會導致滲漏。
- 奶嘴的前端部分是非常脆弱的，用奶嘴刷等清洗時請將指腹按住奶嘴頭進行清洗。
- ※注意：清洗奶瓶時，請勿使用含研磨或金屬等材料的洗具，以免造成磨損。
- 清洗奶嘴時，請務必小心清洗奶嘴前端透氣閥，推薦配合貝親奶嘴刷使用。
- 奶嘴底座上的透氣閥為倒三角形結構，請勿在清洗時大力拉扯或用尖銳物體刺穿該透氣閥。
- 出於保護作用，在透氣閥及奶嘴孔上會添加一些白色粉末。這些白色粉末安全無害，只需在首次使用前洗淨即可。

# 母乳保存

## 母乳保存期限

請按照下圖中表示的期限保存母乳，並儘早給寶寶食用。

	冷藏保存 ( $\leq 4^{\circ}\text{C}$ )	冷凍保存 (約 $-18^{\circ}\text{C}$ )
剛擠出的新鮮母乳	24小時	3個月
解凍後的冷凍母乳 (冷藏室或流動水解凍)	24小時※	不能再次冷凍

※加熱後的母乳請勿再次冷藏、冷凍保存。

## 冷凍母乳的解凍方法

請從以下解凍方法中選擇1項使用

- 浸入到大約 $40^{\circ}\text{C}$ 的溫水中解凍。
- 放入冷藏室內解凍。  
※從冷凍室拿出放入冷藏室內解凍請不要放置超過24小時。
- 放入流動的水中。



## 加熱到適合授乳溫度的方法

- 浸入到大約 $40^{\circ}\text{C}$ 的溫水中加熱。  
※保存中的母乳會出現分離狀況，這屬於正常現象，並不會影響其營養成分，哺餵前請輕輕搖勻。  
※短暫外出時推薦您攜帶冷凍的母乳(未解凍狀態下)。



## ⚠ 注意

- 請勿用煮沸加熱、滾燙開水、微波爐解凍或加熱冷藏、冷凍後的母乳，以免破壞母乳中的營養成分。
- 為更衛生地保存母乳，請勿置於常溫中解凍母乳。
- 請勿使用奶瓶冷凍保存母乳，有可能會造成奶瓶破裂。
- 請勿將解凍好的母乳再次冷凍。
- 請勿將剛吸出的母乳與保存的母乳混合在一起。
- 奶瓶刻度僅供參考，若需要更精確地計量時，請使用計量杯或計量匙。
- 冰箱門的開閉次數和冰箱內放置位置不同可能會導致溫度變化，請注意。



# 無法順利吸奶時

乳房有被充分吸引的感覺嗎？（乳頭有反覆伸縮的動作嗎？）

↓否

將吸乳口取下，將手貼在吸乳口被取下的位置，有被吸引的感覺嗎？

按壓握把用手貼合數次



↓否

是

握把扣板牢牢地嵌入吸奶器主體中了嗎？（參照P.10~11）

↓是

使用舒適密封氣墊（矽膠）時，唧筒（聚丙烯）和舒適密封氣墊（矽膠）正確地組裝在一起了嗎？（參照P.12~13）

↓是

吸乳口和乳房緊密貼合在一起了嗎？（參照P.15）

↓是

吸奶量根據乳房的狀態或身體情況，會有不同。此外還有個體差異。請根據情況，調整至適合自己的吸力後再進行吸奶。

否


否

請正確組裝零件。（參照P.10~13）

否

請將吸乳口緊密貼合在乳房上。（參照P.15）

# 無法順利吸奶時

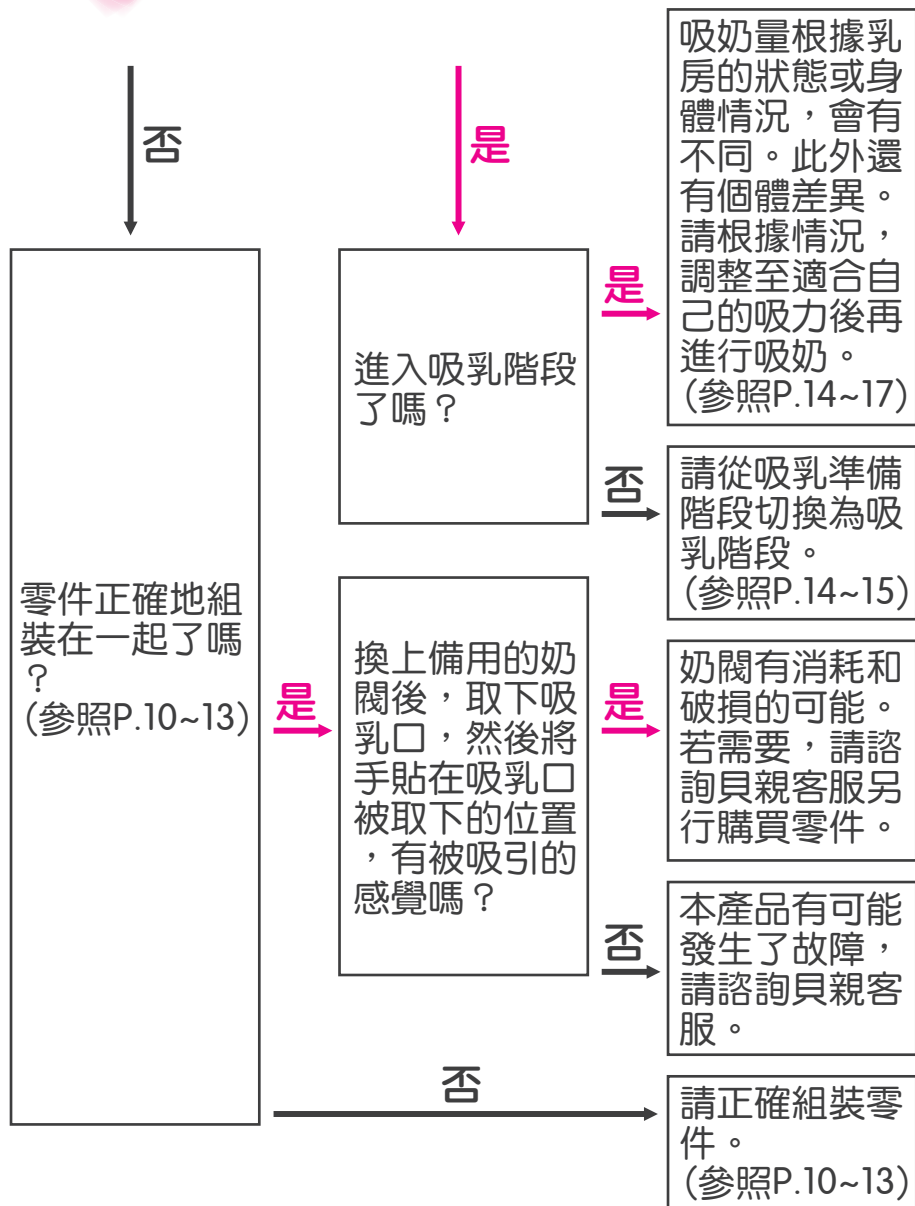

# 材質表及產品規格

\* 本產品於泰國組裝完成

零件/數量	材質	耐熱溫度	產地	消毒方式
握把X1 突出柄X1 握把扣板X1 主體X1 唧筒X1 奶瓶底座X1 奶瓶蓋X1 奶瓶栓X1	聚丙烯	120°C	泰國	煮沸 微波 藥液 蒸氣
隔板X1 矽膠蓋X1、矽膠閥X2 舒適密封氣墊X1 奶嘴X1	矽膠	120°C		
奶瓶X1	PPSU	180°C		

**備用零件包含:1個矽膠閥**

(使用中如有遺失和破損，請立即更換。)

**P00755 手動吸乳器不含矽膠蓋**

- SS size奶嘴孔徑為圓形
- 奶瓶容量160ml(最多盛裝奶量)

## ※奶瓶使用的注意事項

- 使用後，奶嘴和奶瓶請使用專用的奶瓶奶嘴刷進行清洗，充分洗淨後，請務必進行消毒。

